

MaiMed® MyClean IN

Dosiertabelle

Gebrauchslösung*	1,00%	3,00%
1 Liter	10 ml	30 ml
2 Liter	20 ml	60 ml
3 Liter	30 ml	90 ml
4 Liter	40 ml	120 ml
5 Liter	50 ml	150 ml
8 Liter	80 ml	240 ml
10 Liter	100 ml	300 ml

*Gebrauchslösung = Menge Desinfektionsmittelkonzentrat + Differenzmenge Wasser.

Beispiel 1L 1,00% Lösung



Einwirkzeiten

Wirksamkeiten	1,00%	3,00%
bakterizid		15 Min.
levurozid		15 Min.
tuberkulozid		15 Min.
begrenzt viruzid (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV)		15 Min.
begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	15 Min.	
Anwendung Ultraschallbad		5 Min.