

BENUTZERANLEITUNG

ATEMSCHUTZ MASKE
MODELL NR.: YY0525

CE 0370 EN149:2001+2009 FFP2 NR (not reusable / nicht wiederverwendbar)

PRIMÄRSTRUKTUR:

Die äußere Schicht besteht aus Vliesstoff,

260 mm Breite, 50 g / m² Gewicht;

Zweite Schicht ist schmelzgeblasenes Gewebe

FFP2 ≥ 94%, 260 mm Breite, 25 g / m² Gewicht;

Dritte Schicht ist schmelzgeblasenes Gewebe

FFP2 ≥ 94%, 260 mm Breite, 25 g / m² Gewicht;

Vierte Schicht ist Heißluftbaumwolle,

260 mm Breite, 25 g / m² Gewicht;

Innenschicht ist Vliesstoff,

260 mm Breite, 25 g / m² Gewicht;

Nasclip ist Polypropylen / Breite 5 ± 1 mm

+ zwei Edelstahlröhre / Durchmesser 0,5 ± 0,1 mm;

Ohrschleife ist Polyester + Baumwolle,

Zugverhältnis: (2 ± 0,3) mal.

EINSATZBEREICH:

Diese Masken sollten verwendet werden, um den Träger vor festen und nichtflüchtigen flüssigen Partikeln zu schützen und den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 (EN 149: 2001 + A1: 2009) zum Filtern von Gesichtsmasken zur Verwendung gegen Partikel zu entsprechen.

WARNUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN:

- Die richtige Auswahl, Schulung, Verwendung und angemessene Wartung sind unerlässlich, damit die Maske den Träger vor bestimmten Luftschadstoffen schützt.
- Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieser Masken und / oder die Nichtbeachtung dieser Masken während aller Expositionszeiten kann die Wirksamkeit beeinträchtigen und zu Krankheit oder Tod führen.
- Masken bestehen aus ungiftigen und harmlosen Materialien, die den Benutzern keinen Schaden zufügen.
- Diese Masken enthalten keine Komponenten aus Naturkautschuklatex.
- Diese Masken schützen nicht vor Gasen / Dämpfen.
- Nicht in Umgebungen mit weniger als 19,5% Sauerstoff verwenden.
- Nicht zum Schutz der Atemwege vor Luftkontaminanten / -konzentrationen verwenden, die unbekannt oder unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährdend sind (IDLH).
- Verlassen Sie den kontaminierten Bereich sofort, wenn:
 - Das Atmen wird schwierig.
 - Schwindel oder andere Beschwerden auftreten.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie die vollständige Maske verwenden.
- Masken werden nicht für explosionsgeschützte Umgebungen empfohlen.
- Masken dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Entsorgen Sie die Atemschutz Maske und ersetzen Sie diese, wenn diese beschädigt ist, oder der Atemwiderstand zu hoch ist oder am Ende der Schicht.

FIT CHECK:

- Decken Sie die Vorderseite der Maske mit beiden Händen ab und achten Sie darauf, den Sitz der Maske nicht zu stören.
- Bei Maske ohne Ventil - scharf ausatmen.
- Wenn Luft um die Nase austritt, stellen Sie den Nasenclip neu ein, um Leckagen zu vermeiden. Wiederholen Sie die Passformprüfung.
- Wenn an den Maskenkanten Luft austritt, arbeiten Sie die Riemenbank an den Seiten des Kopfes entlang, um Leckagen zu vermeiden. Wiederholen Sie den obigen Fit-Check.

Wenn Sie keine richtige Passform erreichen können, betreten Sie den Gefahrenbereich nicht und wechseln die Maske.

ANZIEHEN:

Bitte waschen Sie die Hände bevor sie die Maske aufsetzen.



Alle Maskenkomponenten sollten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.

- Legen Sie die Maske in die Hand mit dem Nasenbügel nach oben liegend. Führen Sie die Maske an Ihr Gesicht, zuerst über das Kinn, danach über die Nase. Fixieren Sie die Bänder. Passen Sie nun den Nasenbügel Ihrer Nase an, indem Sie mit Ihrem Daumen und Zeigefinger der Nase entlang fahren.
- Prüfen Sie die Dichtigkeit. Maske mit beiden Händen bedecken und stark ausatmen.
Bei geringem Druckaufbau in der Maske, sollte keine Luft an den Rändern entweichen.

Achtung: Bei Bartträgern kann keine Dichtigkeit erreicht werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT:

- Gemäß den Anweisungen des Herstellers lagern.
- Die Lagertemperatur sollte zwischen -20 ° C und +25 ° C liegen.
- Die Lagerfeuchtigkeit sollte unter 80% liegen.
- Verwenden Sie zum Lagern oder Transportieren dieser Maske die Originalverpackung.
- Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

Die Ablaufzeit: 11. Oktober 2023

Die Ablaufzeit: 3 Jahre

BODY:

LGAI Technological Center, S.A (APPLUS)

(CE 0370)

Campus UAB-Ronda de

la Font del Carme s/n

08193

Bellaterra (Barcelona)

T +34 93 567 20 00

Notified Body number : 0370

	Read the instructions.
	The expiry date is given in the format yyyy/mm
	Max ambient relative humidity, storage <80%.
	Storage temperature -20°C to +25°C
	Keep out of direct sunlight
	Single use
CE 0370	CE mark and Notified Body No

Manufacturer:

Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.

Address: No 18 Xinyi Road,

Jianghai District, Jiangmen City,

Guangdong Province, China

Phone: +86 750 3808355

Fax: +86 750 3808345

E-mail: admin@gdyanyang.com

Importeur:

Beltrona GmbH & Co. KG

Adresse: Schmeienstr. 50,

72510 Stetten a.k.M., Deutschland,

www.beltrona.de

BENUTZERANLEITUNG

ATEMSCHUTZ MASKE
MODELL NR.: YY0525

CE 0370 EN149:2001+2009
FFP2 NR (not reusable / nicht wiederverwendbar)

**ALTERNATIVE TRAGeweISE MIT
BEILIEGENDEM CLIP.**



1. Nehmen Sie den beiliegenden Clip und setzen Sie diesen an einer Ohrschleife ein.
2. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Maske (siehe Anleitung). Ziehen Sie dann mit beiden Händen die Ohrschlaufen hinter den Kopf und führen Sie diese zusammen. Fixieren Sie sie mit dem Clip (siehe Bild).
3. Prüfen Sie abschließend, wie in der Anleitung unter Fit Check beschrieben, die Dichtigkeit der Maske.
4. Sollte die Maske die gewünschte Dichtigkeit immer noch nicht erreichen, ist die Maske ungeeignet. Nehmen Sie dann bitte Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne.

ACHTUNG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass ohne den notwendigen Dichtsitz der Maske im konkreten Verwendungsfall eine Partikelfilterwirkung gemäß der Norm EN 149 nicht sichergestellt ist und hierdurch erhebliche Gesundheitsgefahren drohen können.