



MaiMed® – MyClean Wipes premium / soft

Produktbeschreibung

Trockene Vliestuchrollen. Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem.

Premium: mit Lochung für optimales Tränkverhalten

Soft: mit glatter Oberfläche

Anwendung

MaiMed® MyClean Wipes trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5-2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. Mindestens 30 Minuten im geschlossenen Spendersystem durchziehen lassen.

Hinweise: Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, fertigen Gebrauchslösung.

Ausführungen

Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE
trockene Vliestuchrolle premium L	15 cm × 30 cm	140 Blatt	179627	4046153116515	10305982	8
trockene Vliestuchrolle premium XXL	29 cm × 30 cm	90 Blatt	179629	4046153116492	10305976	8
trockene Vliestuchrolle soft L	28 cm × 15 cm	140 Blatt	79655	4046153120956	11141196	8 
trockene Vliestuchrolle soft XXL	28 cm × 30 cm	70 Blatt	79648	4046153118564	10843834	8
trockene Vliestuchrolle soft XXL	28 cm × 30 cm	90 Blatt	179646	4046153117031	10388086	8

Haltbarkeit nach Anbruch

Getränkte MaiMed® MyClean Wipes Vliestuchrolle innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole

