



MaiMed® MyClean S

Produktbeschreibung

Unbefülltes Spendersystem für trockene Vliestuchrolle/Nachfüllpack mit leichter Handhabung. Optimal zu kombinieren mit den Produkten der MaiMed® MyClean-Serie. Fassungsvermögen vom Feuchttuchspender: 3 Liter (70 Blatt) und 5 Liter (90 Blatt/140 Blatt). Spenderdose für die MaiMed® MyClean DS ViruComplete Desinfektionstücher 150 Blatt.

Anwendung

Den MaiMed® MyClean S - Feuchttuchspender mit einer Vliestuchrolle MaiMed® MyClean Wipes à 70 Stück (3-Liter Spender) bzw. 90 Stück oder 140 Stück (5-Liter Spender) befüllen und anschließend mit 1,5-2,5 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken (Herstellerangaben auf Desinfektionstüchern beachten). Vor der Verwendung mindestens 30 Minuten durchziehen lassen. Leere MaiMed® MyClean S - Spenderdose zur Befüllung mit MaiMed® MyClean DS ViruComplete Desinfektionstüchern. Deckel danach gut verschließen.

Ausführungen

Artikelbeschreibung	Größe	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE
Spenderdose	800 ml (für 150 Blatt)	79642	4046153116416	17619175	40
Feuchttuchspender	3 Liter (für 70 Blatt)	79643	4046153116430	10420068	1
Feuchttuchspender	5 Liter (für 90/140 Blatt)	79644	4046153116454	10420074	1

Hinweise

Auf dem beiliegenden Etikett unserer trockenen MaiMed® MyClean Wipes sind folgende Eintragungen zu machen:

Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Der Spender ist beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln und bis 65°C spülmaschinenfest.

Spenderdose mit dem ablösbaren Etikett von MaiMed® MyClean DS ViruComplete Desinfektionstücher zur eindeutigen Kennzeichnung bekleben und zusätzlich mit dem Datum der Befüllung sowie die Haltbarkeitsdauer der Befüllung (max. 28 Tage) versehen.

Vor der erneuten Befüllung ist die MaiMed® MyClean S Spenderdose bzw. der Feuchttuchspender zu reinigen und zu desinfizieren.

Qualitätssicherung

Produktsicherheitsverordnung

Haltbarkeit nach Anbruch

Fertig getränkte Tücher im MaiMed® MyClean S innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole

